

Gebruiksaanwijzing voor de  
duofiets van Zorg Collectief  
Wanroij. Versie 2026



### **Belangrijk!**

De duofiets mag alleen gebruikt worden als u hebt deelgenomen aan een aanvullende gebruiksaanwijzing door Jan Broekmans, en vooraf is gereserveerd via [zcu.nu/duofiets](https://zcu.nu/duofiets).



### **Bij De Lookant gearriveerd**

- Druk op de bel bij de informatiebalie.
- De dienstdoende verpleging komt naar u toe.
- U geeft aan dat u de fiets voor welk tijdstip heeft gereserveerd, en ontvangt de rugzak met spullen en 2 sleutels.
- Sleutel 1 zit in het voorwiel (axa slot).
- Sleutel 2 is van het kabelslot, dat aan de passagiersstoel en de verwarming zit. Haal de kabel alleen los van de stoel, en niet van de verwarming.

- Haal de laadkabel van de accu en leg de kabel met lader (ligt in mandje achterop de fiets) op de grond bij de radiator. De fiets is nu gebruiksklaar.



Doe de passagier en uzelf het veiligheidsvestje aan. Veiligheid staat boven alles.

Zet de fiets buiten en zet de handrem erop voordat de passagier instapt. Laat nu de passagier plaatsnemen.

Armluning naar beneden, zorg dat de passagier goed zit (verzet eventueel de stoel — onder de zitting zit een hendel). Stel de spiegel goed in voor uzelf.

Als de voetplaat van de passagier gebruikt wordt, controleer of de schakelnaaf in stand 2 staat.

---

## Bij terugkomst

- Zet de fiets terug zo dicht mogelijk tegen de muur.
- Kabelslot aan armleuning passagier.
- Leg lader met kabel in het mandje achterop de fiets.
- Controleer of de laadkabel in het 220V stopcontact zit (lampje lader is aan).
- Zet de accu laadkabel aan de accu.
- Zet het fiets voorwiel op slot en hang de 2 sleutels weer aan de band aan de schoudertas.
- Bel de verpleging die de tas komt ophalen.



## Schakelnaaf hoofdbestuurder

Met de schakelnaaf kan de hoofdbestuurder de manier van meefietsen van de bijrijder instellen. Er zijn drie standen:

- **Stand 1:** De pedalen van de bijrijder bewegen mee met de pedalen van de hoofdbestuurder. De bijrijder moet meefietsen.
- **Stand 2:** De pedalen van de bijrijder staan stil. De bijrijder kan niet meefietsen.  
*Let op: deze stand alleen gebruiken in combinatie met de voetplaat.*
- **Stand 3:** De pedalen van de bijrijder bewegen onafhankelijk van de pedalen van de bestuurder. De bijrijder mag meefietsen in eigen tempo, maar kan ook freewheelen.

Stel de schakelnaaf voor het fietsen in op de gewenste stand. Wanneer er in een andere stand gefietst wil worden, eerst de fiets tot stilstand brengen! Bij gebruik van de voetplaat van de passagier altijd de schakelnaaf in stand 2 zetten.

## Schakelnaaf passagier

Hiermee kan het traptempo van de bijrijder worden ingesteld: stand 1 = snel meetrappen, stand 8 = langzaam meetrappen.

### Service duofiets

Alle service wordt verzorgd door Medipoint WMO Nijmegen

Kerkenbos 10-10, 6546-BA Nijmegen

Tel: [024-3778008](tel:024-3778008) · E-mail: [nijmegen@medipoint.nl](mailto:nijmegen@medipoint.nl)

Gebruikersnummer: 20885650

## Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u hier terecht:

| Naam          | Taak  | Contact  |
|---------------|---|--|
| Jan Broekmans | Instrueren nieuwe vrijwilligers in het omgaan met de duofiets (alleen vrijwilligers die een | Tel: <a href="tel:0485-478806">0485-478806</a><br>Mob: <a href="tel:06-10780646">06-10780646</a><br>E-mail: <a href="mailto:jbr6@ziggo.nl">jbr6@ziggo.nl</a> |

| Naam           | Taak  | Contact  |
|----------------|---|--|
|                | instructie hebben gehad zijn bevoegd als duofietsbestuurder)  |  |
| Elise van Wijk | Contactpersoon naar verplegend personeel en aanspreekpunt voor bewoners van De Lookant. Het oordeel van de verpleging is bepalend of bewoners kunnen deelnemen als duofietspassagier. | Tel: <a href="tel:06-23868842">06-23868842</a><br>E-mail: <a href="mailto:elisevanwijk@home.nl">elisevanwijk@home.nl</a> |

Reserveren kan via [zcv.nu/duofiets](https://zcv.nu/duofiets) of per e-mail aan [duofiets@zcv.nu](mailto:duofiets@zcv.nu).